

MIC-KEY®-ravintoportin käyttö kotihoidossa

1

Tee näin kerran päivässä:

1. Pese avannetta ympäröivä iho kerran päivässä osana päivittäistä aamu- tai iltapesua. Pyyhi lopuksi avanteen ympäristö kuivaksi.
2. Huuhtele ruokintaletku käyttäen 10-20 ml vettä ennen jokaista ruokintaa ja sen jälkeen.
3. Kierrä MIC-KEY® -ravintoporttia yksi kierros ravitsemuskanavassa normaalien aamu- ja iltatoimien yhteydessä.

2

Tee näin kerran viikossa:

Tarkista ballongin vesimäärä ja vaihda vesi esim. joka maanantai

3

Tee näin joka toinen kuukausi:

Hoida MIC-KEY®-ravintoporttia kuin ruokailuvälineitäsi. Vaihda ravintoportti uuteen noin kahden kuukauden välein. Tällöin laite on värjäätynyt ja takaiskuventtiilin kunto on saattanut heikentyä.

HUOM! Jos ruokintatilanteessa ilmenee kipua, keskeytä annostelu ja ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai hoitajaan.