

Mic-Key® -SYÖTTÖLETKUT ENFit-LIITTIMILLÄ

OIKEAN KÄYTÖN JA HOIDON OPAS



- 1. PUHDISTA:** Vältä ravitsemusliuoksen kertymistä kierteeseen. Puhdista säännöllisesti lämpimällä saippuavedellä käyttöohjeen mukaisesti.

- 2. YHDISTÄ:** Varmista, että kierre on kierretty pohjaan saakka vuotamisen ehkäisemiseksi. Älä kierrä kierrettä tiukkaan. LOPETA kun tunnet vastuksen.



- 3. KORKKI:** Varmista, että korkki on oikein kiinnitetty painamalla ja kiertämällä se sisään. Sulkeaksesi korkin kiertämällä, paina korkkia huolellisesti porttia vasten. Kun korkki lukittuu, kierrä korkkia siten, että korkin kiinnitysnauha jää suoraan. Kierteellä oleva kiinnityshihna voisi aikaansaada korkin aukeamisen.

- 4. KOHDISTA:** Kierrä ruisku tai ravitsemusletku porttiin vain, kun se on suorassa porttiin nähden. Näin se ei kierry väärille kierteille. Tämä ehkäisee kierteiden ja syöttöletkun rikkoutumisen.



- 5. MUUT LIITÄNNÄT:** Yritä välttää osumasta toiseen porttiin käytettäessä toista porttia. Huomioi tämä erityisesti käytettäessä ruiskua, jonka kärki ei sijaitse keskellä ruiskun päätä.

- 6. AUKAISEMINEN:** Älä käytä voimaa tai instrumentteja kierteen avaamiseen. Jos kierre on juuttunut, sen avaamista helpottaa upottaminen lämpimään saippuaveteen.