



# FARRELL\* -järjestelmä

## VINKKEJÄ

1. Jotta FARRELL\* -järjestelmä toimii oikein, FARRELL\* "Y" -portin tulee olla mahalaukun TASOLLA tai sen ALAPUOLELLA
2. Mikäli potilaan maha on pullistunut, tee mahalaukun dekompressio ruiskulla manuaalisesti ennen FARRELL\* -järjestelmän käytön aloittamista.
3. Potilaat, joilla on hyvin pienet ravitsemusmäärät (vastasyntyneet), saattavat vaatia merkittävästi pidemmän ajan (60-90 min) virtauksen käynnistymiseksi ennen "Y" -portin yläpuolella olevan VALKOISEN sulkijan aukaisemista.
4. FARRELL\* -järjestelmän toimiessa oikein, ravintoliuos saattaa liikkua jatkuvasti ylös ja alas FARRELL\* -letkustossa.
5. FARRELL\* -järjestelmä poistaa jatkuvasti kaasuja potilaan mahasta, mutta FARRELL\* -pussi ei yleensä täyty kaasusta, koska siinä on venttiili.
6. Lääkkeitä annosteltaessa, käytä PEG-letkun toista syöttöporttia (ns. lääkeportti) aina kun mahdollista. Sulje SININEN suljin ennen kuin avaat PEG-letkun syöttöportin. Annostele lääkeaine ja odota 5-10 minuuttia ennen kuin avaat uudelleen SINISEN portin.
7. Mikäli ravitsemusvalmiste nousee takaisin FARRELL\* -pussiin ja epäillään tukosta PEG- tai NM-letkussa, sulje SININEN suljin ja irroita FARRELL\* -järjestelmä. Tarkista tukokset letkuissa. Kun tukokset on poistettu, yhdistä FARRELL\* -järjestelmä uudelleen.

**TÄRKEÄÄ:** Mikäli FARRELL\*-pussissa on suuri määrä nestettä tukoksen aukaisemisen jälkeen, aseta FARRELL\* -pussi pään korkeudelle ehkäistäkseen vapaasti virtaavan boluksen siirtymistä potilaaseen.

**VAROITUS:** FARRELL\* -järjestelmän ollessa toiminnassa, virtausta potilaaseen ohjaa ensisijaisesti painovoima. Normaalitylanteessa (ei Farrell\* -järjestelmää), pumpun paine (12-18 psi) saattaa aukaista PEG- tai NM-letkun tukokset. Farrell\* -järjestelmän ollessa toiminnassa, nämä tukokset eivät välttämättä aukea ja kliininen ravintovalmiste virtaa takaisin FARRELL\* -pussiin. Mikäli näin tapahtuu, sulje VALKOINEN suljin, joka sijaitsee FARRELL\* -järjestelmän "Y" -portin yläpuolella ja odota muutama minuutti nähdäksesi pystyykö pumppu silloin aukaisemaan tukoksen. Varmista, että VALKOINEN suljin FARRELL "Y" -portin yläpuolella on SULJETTU ja SININEN suljin FARRELL "Y" -portin alapuolella on AUKI.



**Yhteys edustajaan: p. 020-720 9555, infofi@viatris.com**  
**FARRELL\* -JÄRJESTELMÄ ref. 44-4100, Tamron nro: 2382232**  
**Tilaukset TAMRO OYJ:**

- asiakaspalvelu@tamro.com
- TamroOnline
- p. 020 445 3300

# AVANOS